

MULTIFUNCIONAL 1LOF

LOBO FOOT

LOBO FOOT

fibra de carbono

El Lobo Foot está diseñado como un pie multifuncional con una estructura completa de fibra de carbono. Tiene dos placas principales divididas en dos partes que permiten movimientos de inversión y eversión de más o menos 10° del pie de carbono.

Además, el diseño de la placa principal dividida del pie proporciona una torsión de más o menos 5° de la sección de la pirámide. Para un ciclo de marcha más suave, hay una placa interna adicional de carbono que brinda comodidad durante la fase de apoyo, haciendo que la placa principal se flexione hasta un punto particular fácilmente y evita cargas adicionales.

Se recomienda para pacientes con un grado de movilidad de 3 - 4, y un peso máximo de 125 kg.

PRECAUCIÓN

No exponga el componente protésico a entornos que propicien la corrosión de los componentes metálicos, así como la degradación de los elementos que constituyen el pie protésico, de ser expuesta a cualquiera de estos entornos y el pie tuviera marcas de su exposición a algún elemento que propicie su deterioro, se perderá la garantía que ofrece O and P México.



GRADO DE MOVILIDAD



PESO MÁXIMO PACIENTE



MOVILIDAD

3-4

RESISTENCIA

125 KG

CLAVE

1LOF

PESO DE PIEZA

390 GR

GARANTÍA

El pie 1LOF solamente se podrá garantizar, si es empleado en las condiciones descritas en esta ficha. Este producto es garantizado por 1 año empleando exclusivamente productos modulares O and P.


LOBO FOOT

INSTRUCCIONES DE USO

El Lobo Foot está diseñado para tener un talón con altura de 10 mm (o aproximadamente de 5 mm.) para estar en la posición adecuada en la prótesis. Coloque una pieza debajo del pie para proporcionar una altura de talón de 10 mm al ensamblar el Lobo Foot con el resto de la prótesis.¹

El pie debe colocarse en una posición de modo que la línea de carga pase por el tercio posterior del pie, lo que estará delante de la pirámide, aproximadamente a 15 mm.²

El cover del Lobo Foot es un producto protésico desechable y puede desgastarse después de un uso de 6 meses a 1 año, dependiendo de la actividad del paciente. En este caso, por favor, reemplace el cover de inmediato para evitar cualquier daño al Lobo Foot. La extracción del cover se puede realizar fácilmente con la herramienta de cover, empujando suavemente el pie con la ayuda de la herramienta.

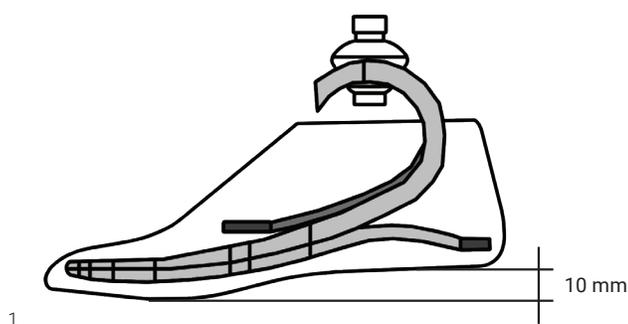

GRADO DE MOVILIDAD

PESO MÁXIMO PACIENTE

MOVILIDAD 3-4 **RESISTENCIA** 125 KG

CLAVE 1LOF **PESO DE PIEZA** 390 GR

